

エイド みみより通信

2016
Vol.12
WINTER



タイトル「メリークリスマス～青山店のマスコットくまより～」 青山店 高野 涼子

特集 補聴器の冬じたく ～冬場の注意点～

新キャラクター誕生 !!

お客様紹介コーナー「私と補聴器」、スタッフコラム、
みみより情報、社長のクッキングコーナー「MACO'S キッチン」、
エイドクイズ

きこえる 幸せ
ニイガタエイド



ニイガタエイド

新キャラクター誕生!!

いつもありがとうございます。


創刊から5年、毎回補聴器のあるあるネタを
教えてくれていたエイドマンから代替わりをし、
新キャラクターを迎えることになりました。
エイドマンに代わり、これからちょっと為になるような
お話を掲載していきたいと思っておりますので、
今後ともよろしくお願い致します。

▼うさおかしん
優しく教えてくれるよ

よろしく
お願い致します。

◀もりくまさん
やる気満々の元気印!

◀しぶびよさん
たまにコンッ
と現れるよ

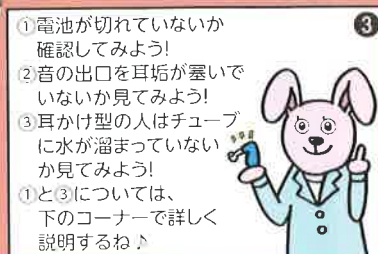

エイドマン! 今までありがとう!!



エイドマンの今までの活躍をまとめた小冊子を各店頭にて限定10部プレゼント!
もりくまさんの世代交代のお話も店頭またはfacebookで公開中です!



準備は出来てますか??

補聴器の冬じたく ~冬場の注意点~

① 電池


補聴器で使われている空気電池は、空気を取り込んで発電するので冬場の空気の乾燥や、暖房器具等から発生する二酸化炭素の影響で電池寿命が(本来よりも)短くなることがあります。また、電池が冷えていると本来の性能を発揮できないこともあります。

*暖房を使用する時は、健康の為にも十分な換気を行ってください。

*朝、電池を補聴器に入れる前に手のひら等で電池を温めてから使用してください。

さまざまな場面で使用した時の電池寿命の違い!

(補聴器用空気電池:PR41) 放電:1.5kΩ(0.9V Cut)

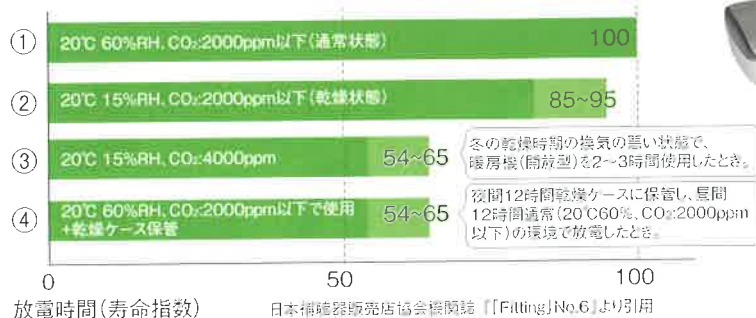

② 結露

冬の朝に窓に水滴がついたり、寒い屋外から暖かい屋内に入った時に眼鏡が曇るのと同じように、気温が低くなると補聴器にも結露が発生することがあります。特に耳掛け型補聴器の本体と耳栓をつないでいるチューブに水滴が溜まると、音が弱くなったり全く聞こえなくなったりします。

電気乾燥器でしっかり乾燥を!

当社オススメ乾燥器

ドライ&ストア ゼファー型
¥14,040(税込)



ドライ&ストア
グローバルII
¥22,680(税込)



クイックエイド
¥8,080(税込)

チューブの中にたまった水滴を風で吹き飛ばします。

*故障の原因になるので必ず補聴器本体からチューブを取り外して使用してください。詳しい使用法につきましてはスタッフにお問い合わせください。



エアブローワー
¥1,080(税込)



雪国新潟ならではの!

意外と多い冬の注意

雪の中に補聴器を落としてしまうと紛失や故障の原因になります。落下のリスク回避と補聴器の音の安定の為に、耳掛け型補聴器をお使いの方は耳の形に合わせたオーダーメイド耳栓の作成をおすすめします。

*オーダーメイド耳栓の作成についてはスタッフまでお問い合わせください。

*お耳の状態によっては作成できない場合もございますのでご了承ください。

佐藤誠社長 クッキングコーナー

MACO'S キッチン

青椒肉絲という、牛肉を使うのが一般的ですが、今回は豚肉で作ってみます。

【4人前材料】

- 豚肉ロース肉(5ミリ厚の物).....150g~200g
- ピーマン.....3~4個
- 竹の子水煮.....100~150g
- もやし.....半袋(売られてる量が違うので、適宜)
- 根しょうが.....1片

【調味料】

- ・ゴマ油.....大さじ3
- ・醤油.....大さじ1.5
- ・酒.....大さじ1.5
- ・みりん.....大さじ1.5
- ・砂糖.....小さじ1
- ・片栗粉.....大さじ1
- ・コショウ.....少々
- ・オイスターソース.....小さじ1(あれば)

我が家の豚肉を使った「青椒肉絲」

作り方

1. 豚肉を5ミリの細切りにして、下記調味料と混ぜ合わせて10分程おく。
(しょうが汁少々、みりん大さじ半分、酒、大さじ半分、砂糖小さじ1、醤油大さじ半分)
2. ピーマン、竹の子は、共に細切りにしておく。もやしは水洗いし、水気を切って置く。
3. 熱したフライパンに、ゴマ油大さじ3を入れ、下味を付けた豚肉に片栗粉大さじ1をまぶして炒める。まんべんなく火が通ったら、一旦皿に移し油を切っておく。
4. その油で、竹の子、ピーマン、もやしを炒め、油切した豚肉を入れ一緒に炒め、残った調味料、みりん、お酒、醤油各大さじ1を入れる。
5. 最後にコショウ、オイスターソースを入れ炒めて出来上がり。温かいうちに召し上がってください。

ポイント

肉への下味をつける事。炒め過ぎに注意。

材料はあくまでも目安ですので、材料はお好きのようにアレンジしてください。



エイドクイズ

読者プレゼント

全問正解の方の中から抽選で3名様に
「(エイド)オリジナルバスタオル」をプレゼント。

～あなたはエイドについてどのくらい知っている？～

○か×でお答えください。

- Q1 今回新たに登場したうさぎのキャラクター名はうさむらさん。
- Q2 二酸化炭素の影響で電池寿命が短くなることがある。
- Q3 ニイガタエイドはfacebookを始めた。
- Q4 補聴器は湿気や結露の心配をしなくても良い。

【プレゼント応募方法】

官製はがきに ①Q1~4の答え ②氏名 ③郵便番号・住所 ④電話番号 ⑤アンケートの答えを明記してお送りください。

【応募〆切】2017年1月10日必着

【応募先】〒950-2002 新潟市西区青山2-5-60
ニイガタエイド(株)「みみより通信 編集部」宛

【アンケート】

1. 今号で面白かったものをお選びください。(複数可)
①新キャラクター誕生!! ②補聴器の冬たく ③私と補聴器
④スタッフコラム ⑤みみより情報 ⑥MACO'Sキッチン
⑦エイドクイズ
 2. 今後取り上げてほしいテーマなど、「みみより通信」に対するご意見・ご要望などありましたらお聞かせください。
- ※当選者の発表は、プレゼント商品の発送をもってかえさせていただきます。

前号の答え Q1. ○ Q2. × Q3. ○ Q4. ○

電話もより良く聞こえる補聴器

環境自動適応型で毎日が楽ラク

unitron North

ユニトロン ノース

製品レベルを切換え、気になる聞こえの違いを試聴体験できます!
ユニトロン日本総代理店 NJH



OTICON | Opn

周囲の会話や音をより精密に捉え、自然な音環境を再現
より健聴者の聞こえに近づけた補聴器の登場です



oticon
PEOPLE FIRST

自然体の「聞こえ」で、もっと自由なコミュニケーションを

フォナック ベンチャーシリーズ

「オートセンス OS」搭載。

居る場所に合わせて、その場に適したプログラムを自動的にブレンド・選択。
複雑な設定をする手間や心配がなく、快適な聞こえを味わうことができます。



PHONAK
life is on

一般社団法人日本補聴器販売協会加盟店 障害者総合支援法補聴器取扱店



ニイガタ エイド 株式会社



0120-74-4133

<http://www.niigata-aid.co.jp>

ニイガタエイド



新潟本店

Tel.025-244-8803
Fax.025-244-8804

新潟市中央区東2丁目3番11号アールパークハイツ1F
■営業時間/平日9:00~17:30
土曜9:00~16:00
■定休日/日曜・祝日

青山店

Tel.025-234-6633
Fax.025-234-6600

新潟市西区青山2-5-60
■営業時間/平日9:00~17:00
土曜9:00~16:00
■定休日/日曜・祝日

新津店

Tel.0250-21-3341
Fax.0250-21-3345

新潟市秋葉区新津本町2丁目3番11号
■営業時間/平日9:00~17:00
土曜9:00~16:00
■定休日/木曜・日曜・祝日

白根店

Tel.025-371-1333
Fax.025-371-1335

新潟市南区白根3069
■営業時間/平日9:00~17:00
土曜9:00~16:00
■定休日/日曜・祝日

長岡店

Tel.0258-34-6007
Fax.0258-31-3423

長岡市東坂之上町2丁目2番地6
■営業時間/平日9:00~17:30
土曜9:00~16:00
■定休日/日曜・祝日

佐渡店

Tel.0259-52-4715
Fax.0259-52-5857

佐渡市津田992
■営業時間/平日9:00~17:00
土曜9:00~15:00
■定休日/木曜・日曜・祝日